

## アニメック AM-1N/AM-2N 簡易チェック項目

### △ 注意！

- ※ このチェック項目は、簡易的に破損や故障の可能性を確認するためのものです。  
このチェックで、破損および故障の可能性があると判断される場合は、点検・修理をお申し付け下さい。
- ※ 簡易チェックとは別に、定期的な点検を行うようにしてください。

### ① 外観チェック

- |           |      |   |
|-----------|------|---|
| ・ 本体ケース   | 破損：有 | 無 |
| ・ ヒンジ（蝶番） | 破損：有 | 無 |
| ・ スイッチカバー | 破損：有 | 無 |
| ・ 電源コード   | 破損：有 | 無 |
| ・ 吊りバンド   | 破損：有 | 無 |

### ② 動作チェック

電源プラグを、コンセントに差し込んで確認を行う。

- ・ スイッチ

ランプの点灯	：有	無
スイッチの動き	：有	無

- ・ ホットプレート


加温	：有	無
----	----	---

（加温の確認は、スイッチ ON 後、3～4 分経過後に確認を行う。

加温時には、スイッチのランプが点灯状態になっていること）

### ③ 温度チェック

- ・ 以下の方法で温度計測を行う。

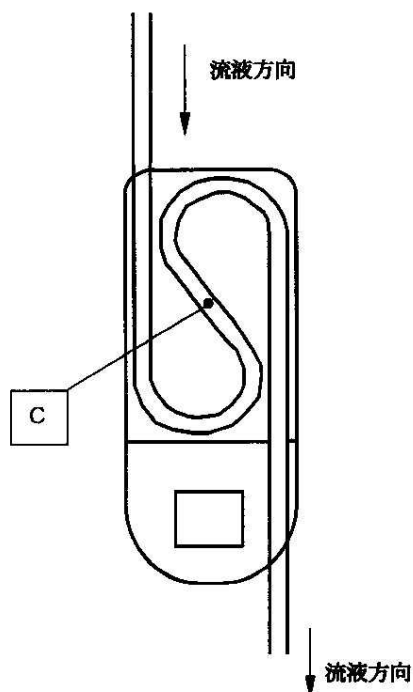

#### 測定条件：

室温 : 25°C ± 3°C

#### 温度測定点：

C 点  
ホットプレート中央部の表面温度

#### 備考：

電源投入後、5～10 分後に、ホットプレートの表面温度を測定する。

チューブを取付けて、液温を測定する必要はありません。

表面温度が 40～42°C の範囲内にあれば OK。  
42°C を超えている場合は、修理が必要。