

アニメック SA-1A/SA-1B 簡易チェック項目

△ 注意！

- ※ このチェック項目は、簡易的に破損や故障の可能性を確認するためのものです。
このチェックで、破損および故障の可能性があると判断される場合は、点検・修理をお申し付け下さい。
- ※ 簡易チェックとは別に、定期的な点検を行うようにしてください。

① 外観チェック

- | | | |
|-----------|------|---|
| ・ 本体ケース | 破損：有 | 無 |
| ・ ヒンジ（蝶番） | 破損：有 | 無 |
| ・ スイッチカバー | 破損：有 | 無 |
| ・ 電源コード | 破損：有 | 無 |
| ・ 吊りバンド | 破損：有 | 無 |

② 動作チェック


電源プラグを、コンセントに差し込んで確認を行う。

- ・ スイッチ
ランプの点灯 : 有 無
スイッチの動き : 有 無
- ・ ホットプレート
加温 : 有 無

(加温の確認は、スイッチ ON 後、3～4 分経過後に確認を行う。
加温時には、スイッチのランプが点灯状態になっていること)

③ 温度チェック

- ・ 以下の方法で温度計測を行う。

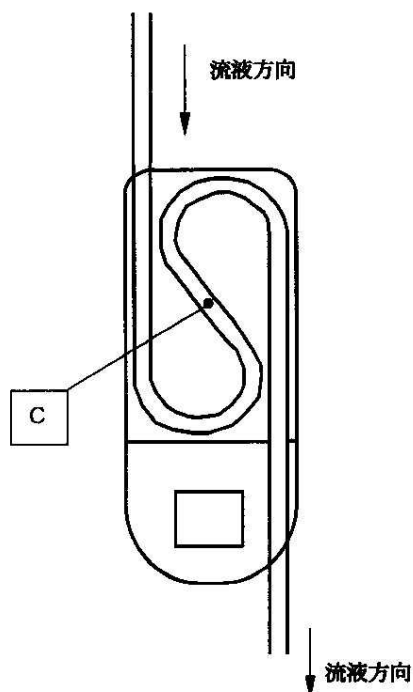

測定条件：

室温 : $25^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$

温度測定点：

C 点
ホットプレート中央部の表面温度

備考：

電源投入後、5～10 分後に、ホットプレートの表面温度を測定する。

チューブを取付けて、液温を測定する必要はありません。

表面温度が $40\sim 42^{\circ}\text{C}$ の範囲内にあれば OK。
 42°C を超えている場合は、修理が必要。